




# CARETA PROTECTORA / FACE SHIELD

## FICHA TÉCNICA

### CONTENIDO


- Marco (1 unidad).
- Visor (1 unidad).
- Correa tensora (1 unidad).

Producto Liviano 

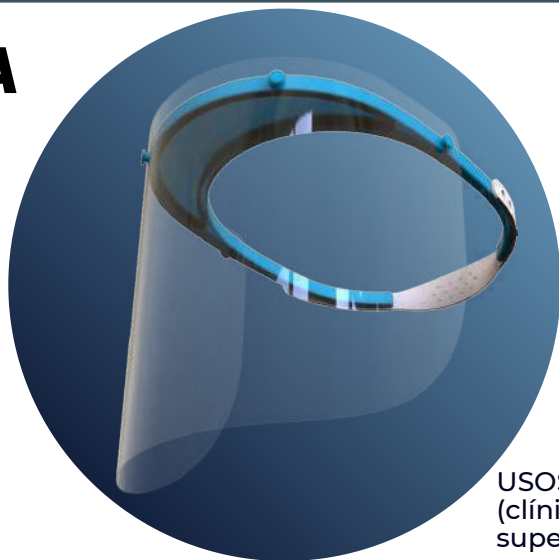

PRODUCTO 100%  
RECICLABLE

USOS: Aplica para todo tipo de actividades (clínicos, manejo de alimentos, atención en supermercados, bancarios, farmacias, etc).

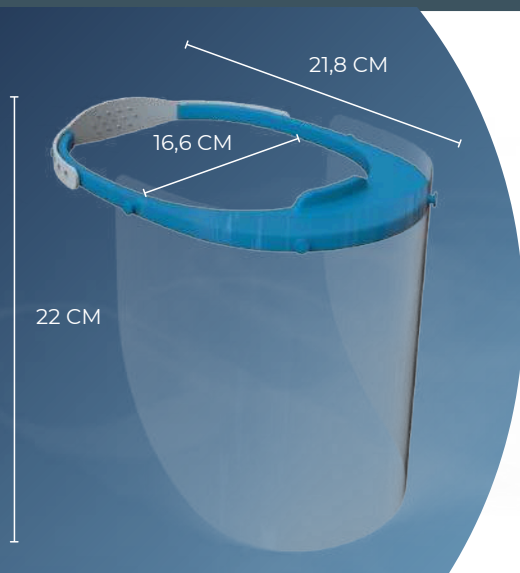

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Marco en **POLIPROPILENO** 100% original, diseño ergonómico, tiene protección superior y refuerzos estructurales que garantizan una mayor comodidad al usuario.
- Correa tensora en **PVC** 100% original, posee diferentes orificios para su ajuste.
- Visor frontal en **PET** 100% original con protección UV, resistente a la corrosión, humedad, golpes y rayones leves.
- Espesor del visor: 0.304 milímetros.
- Peso total: 60 gramos.

## MÉTODO DE USO



1. Retire el marco y la correa tensora del empaque.
2. Retire con cuidado el visor de la bolsa de empaque.
3. Ajuste el marco con la correa tensora en la posición de comodidad para su cabeza.
4. Retire el marco de su cabeza e instale el visor frontal comenzando con los pines centrales y luego laterales.
5. Ubique la careta sobre su cabeza y protéjase.

## RECOMENDACIONES



- Desinfecte todas las partes con alcohol antes de armar el producto.
- Para limpiar el visor utilice un paño de microfibra.
- No utilice otros productos químicos para desinfectar el producto.
- Evite manipular excesivamente la careta.
- Después de usar, desinfecte con alcohol las superficies de la careta.

**EL PRESENTE DISEÑO Y PRODUCTO TIENEN PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**