

FICHA TÉCNICA

BENZALTEC 5G JABÓN

Cód. DPF-041 – V. 1.0 – 2016/06/06



BENZALTEC JABÓN es un potente desinfectante a base de amonios cuaternarios de última generación, indicado como agente de limpieza y desinfección prequirúrgica de piel intacta, de dispositivos médicos, equipos biomédicos e instrumental médico-odontológico y afines, con el fin de evitar la propagación de procesos infecciosos.

Producto biodegradable listo para usar, no es tóxico ni irritante. Su pH neutro lo hace amigable con la piel. También es tuberculicida, fungicida y virucida.

🔍 COMPOSICIÓN

Este producto está compuesto por:

- ✓ Amonios cuaternarios de quinta generación.
- ✓ Tensoactivos.
- ✓ Excipientes
- ✓ Con o Sin Fragancia – Según preferencia del Cliente.

📄 PRESENTACIONES

500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL y 19.000 mL.
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador.

📄 **REGISTRO SANITARIO**
2016DM-0015723

🔪 USOS

Se aplica en la desinfección de dispositivos médicos, instrumental y equipos en el sector clínico-odontológico, hospitalario y desinfección prequirúrgica de piel intacta, con el fin de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos.

✅ INSTRUCCIONES DE USO

Aplique y frote el utensilio o superficie objeto de limpieza, de tal forma que la superficie sea cubierta completamente por el producto y deje actuar. Recuerde que ningún desinfectante destruye los microorganismos de manera inmediata, por lo tanto, requiere un tiempo mínimo de contacto entre el instrumento a desinfectar y el producto. Intente eliminar con anterioridad el material orgánico para una mayor efectividad. Finalice el proceso enjuagando con abundante agua.

⚠️ PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- ✓ Evite el contacto con los ojos. En tal caso, lavar con abundante agua.
- ✓ Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ En caso de reacción adversa en contacto con piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.

