


MAGICAL WARMERS

Ficha técnica cojines térmicos

- Los cojines térmicos MAGICAL WARMERS son una compresa reutilizable, auto activable, amigable con el medio ambiente, cómoda, fácil y segura de usar.
- **COMPONENTES:** Acetato de sodio. Moneda de aleaciones de cobre.
- **TEMPERATURA** Hasta 52° Centigrados. Reacción térmica en segundos.
- **TIEMPO CALOR:** Hasta 45 minutos (según el tamaño del producto).

USOS COJINES TERMICOS MAGICAL WARMERS

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Cólicos menstruales | • Bursitis |
| • Dolor de espalda alta y baja | • Sinusitis |
| • Dolor de Cuello | • Desgarros |
| • Artritis (Dolores articulares) | • Mastitis |
| • Estrés. | • Tendinitis |
| • Torticolis. | |
| • Lesiones musculares | |

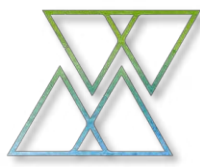

MAGICAL WARMERS

Instrucciones de uso para activar.

- Active el cojín térmico MAGICAL WARMERS flexionando con los dedos el disco metálico interno hasta crear la reacción térmica.
- Asegúrese que la reacción térmica se distribuya por todo el cojín.
- Ubique el cojín térmico MAGICAL WARMERS en la zona afectada del cuerpo.

Instrucciones de uso para reutilizar.

- En un recipiente lo suficientemente grande, hervir agua.
- En agua hirviendo, sumergir el cojín térmico MAGICAL WARMERS en su totalidad.
- Dejar hirviendo el agua junto con el cojín térmico sumergido a fuego alto entre 10 y 20 minutos (según tamaño del producto) hasta que regrese al estado líquido.
- Asegúrese que el cojín térmico MAGICAL WARMERS vuelva a su estado líquido 100%.

NOTA El cojín térmico MAGICAL WARMERS puede ser utilizado durante el proceso de enfriamiento. No presionar la moneda en el proceso de enfriamiento, ya que se vuelve a activar y no volvera a su estado liquido

