



# MAGICAL WARMERS

## Ficha técnica cojines térmicos

- Los cojines térmicos MAGICAL WARMERS son una compresa reutilizable, auto activable, amigable con el medio ambiente, cómoda, fácil y segura de usar.
- **COMPONENTES:** Acetato de sodio. Moneda de aleaciones de cobre.
- **TEMPERATURA** Hasta 52° Centigrados. Reacción térmica en segundos.
- **TIEMPO CALOR:** Hasta 45 minutos (según el tamaño del producto).

### USOS COJINES TERMICOS MAGICAL WARMERS

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • Cólicos menstruales            | • Bursitis   |
| • Dolor de espalda alta y baja   | • Sinusitis  |
| • Dolor de Cuello                | • Desgarros  |
| • Artritis (Dolores articulares) | • Mastitis   |
| • Estrés.                        | • Tendinitis |
| • Torticollis.                   |              |
| • Lesiones musculares            |              |



## MAGICAL WARMERS

### Instrucciones de uso para activar.

- Active el cojín térmico MAGICAL WARMERS flexionando con los dedos el disco metálico interno hasta crear la reacción térmica.
- Asegúrese que la reacción térmica se distribuya por todo el cojín.
- Ubique el cojín térmico MAGICAL WARMERS en la zona afectada del cuerpo.

### Instrucciones de uso para reutilizar.

- En un recipiente lo suficientemente grande, hervir agua.
- En agua hirviendo, sumergir el cojín térmico MAGICAL WARMERS en su totalidad.
- Dejar hirviendo el agua junto con el cojín térmico sumergido a fuego alto entre 10 y 20 minutos (según tamaño del producto) hasta que regrese al estado líquido.
- Asegúrese que el cojín térmico MAGICAL WARMERS vuelva a su estado líquido 100%.

**NOTA** El cojín térmico MAGICAL WARMERS puede ser utilizado durante el proceso de enfriamiento. No presionar la moneda en el proceso de enfriamiento, ya que se vuelve a activar y no volvera a su estado liquido

